

La AEMPS informa de un problema de seguridad relacionado con las sillas de ruedas Jazz S50 y 708D

Fecha de publicación: 06 de enero de 2023

Categoría: productos sanitarios, seguridad

Referencia: PS, 05/2023

- **Posible reducción de la resistencia a impactos de la horquilla delantera de determinados números de serie de las sillas de ruedas Jazz S50 y 708D, fabricadas por Vermeiren Group, Bélgica**
- **La Agencia establece una serie de recomendaciones de cómo actuar para pacientes, farmacias y ortopedias**

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento, a través del fabricante Vermeiren Group, Bélgica, de un riesgo de seguridad relacionado con determinados números de serie de las Sillas de ruedas Jazz S50 y 708D, debido a la posibilidad de que la horquilla delantera tenga una menor resistencia a impactos.

De acuerdo con la información facilitada, la empresa ha detectado que se ha mezclado una pequeña cantidad de plástico con una composición diferente durante la producción de determinadas horquillas delanteras, lo que podría reducir la resistencia a impactos en la horquilla.

Estos productos se distribuyen en España a través de la empresa Vermeiren Ibérica SLU, situada en la Carretera de Cartellà, Km. 0,5, Sant Gregori Parc Industrial, edificio A; 17150 Sant Gregori (Girona).


Situación actual en España

Vermeiren Group, Bélgica, está enviando una nota de aviso a las farmacias y ortopedias a las que se han suministrado las sillas de ruedas afectadas en nuestro país para informarles del problema detectado y de las acciones a seguir.

Además, ha puesto a disposición de Vermeiren Ibérica SLU, los kits para que las horquillas delanteras de las sillas de ruedas afectadas puedan ser reemplazadas.

Productos afectados

Sillas de ruedas Jazz S50 y 708D

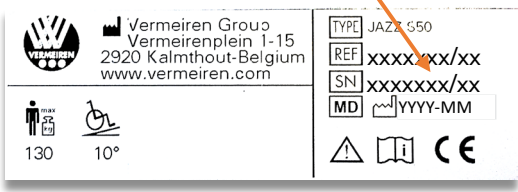

Referencias y Números de serie afectados distribuidos en España:

Ver Anexo 1 de esta nota informativa.



Información para centros sanitarios y pacientes

Si dispone de alguna silla de ruedas Jazz S50 o 708D cuyo nº de serie figura en el anexo 1 de esta nota informativa:

- Contacte con el distribuidor, la farmacia u ortopedia donde adquirió la silla para que le informen de las medidas a tomar y de la fecha prevista en la que podrán repararle la silla de ruedas.



Información para farmacias y ortopedias

- Si dispone en su establecimiento de alguna silla de ruedas Jazz S50 o 708D cuyo nº de serie figura en el anexo 1 de esta nota informativa, consulte la **nota de aviso** de la empresa, así como las instrucciones para la reparación de la silla de ruedas.
- Si ha vendido o entregado a pacientes o centros sanitarios alguna de estas sillas de ruedas afectadas, identifíquelas y contacte inmediatamente con ellos para reemplazar preventivamente las horquillas delanteras.
- Contacte con Vermeiren Ibérica SLU, para recibir los kits de reparación necesarios.
- No entregue las sillas de ruedas afectadas a ningún paciente ni centro sanitario hasta que se hayan reemplazado las horquillas delanteras.

Datos del distribuidor

Vermeiren Ibérica SLU,
Carretera de Cartellà, Km. 0,5,
Sant Gregori Parc Industrial - Edificio A;
17150 Sant Gregori (Girona).



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su

ANEXO 1

Ref.	Nº Serie			
	T0348578	T0348858	T0349011	T0349642
	T0348579	T0348859	T0349012	T0349643
	T0348580	T0348860	T0349013	T0349644
	T0348581	T0348861	T0349014	T0349650
	T0348624	T0348862	T0349015	T0349651
	T0348625	T0348863	T0349016	T0349652
	T0348626	T0348864	T0349017	T0349653
	T0348627	T0348865	T0349018	T0349654
	T0348628	T0348866	T0349019	T0349655
	T0348629	T0348867	T0349020	T0349656
	T0348630	T0348868	T0349021	T0349657
	T0348631	T0348923	T0349022	T0349658
	T0348632	T0348924	T0349023	T0349659
	T0348633	T0348925	T0349024	T0349660
	T0348634	T0348926	T0349025	T0349661
	T0348635	T0348927	T0349026	T0349662
	T0348636	T0348928	T0349027	T0349663
	T0348637	T0348929	T0349028	T0349664
	T0348638	T0348930	T0349029	T0349665
4020722	T0348639	T0348931	T0349030	T0349666
	T0348736	T0348932	T0349031	T0349667
	T0348840	T0348933	T0349032	T0349668
	T0348841	T0348934	T0349033	T0349669
	T0348842	T0348935	T0349034	T0349670
	T0348843	T0348936	T0349035	T0349671
	T0348844	T0348937	T0349036	T0349672
	T0348845	T0348938	T0349175	T0349673
	T0348846	T0348939	T0349176	T0349674
	T0348847	T0348940	T0349177	T0349675
	T0348848	T0348941	T0349178	T0349796
	T0348849	T0348942	T0349179	T0349797
	T0348850	T0348943	T0349180	T0349798
	T0348851	T0348944	T0349635	T0349799
	T0348852	T0348945	T0349636	T0349800
	T0348853	T0348946	T0349637	T0349801
	T0348854	T0348947	T0349638	T0349802
	T0348855	T0349008	T0349639	T0349803
	T0348856	T0349009	T0349640	T0349804
	T0348857	T0349010	T0349641	T0349805



Ref.	Nº serie
4020724	T0349173
	T0349222
	T0349223
	T0349224
	T0349225
	T0349226
	T0349227
	T0349228
	T0349229
	T0349230
	T0349231
	T0349232
	T0349233
	T0349234
	T0349235
	T0349236
	T0349237
	T0349238
	T0349239
	T0349240
	T0349241
	T0349242
	T0349243
	T0349244
	T0349492
	T0349497
	T0349498
	T0349499
	T0349502
	T0349503
	T0349504
	T0349505
T0349506	
T0349511	
T0349517	
T0349520	
T0349521	
T0349522	
T0349523	
T0349524	
T0349526	

Ref.	Nº Serie
4020725	T0348536
	T0348537
	T0348538
	T0348539
	T0348540
	T0348541
	T0348542
	T0348543
	T0348544
	T0348545
	T0348546
	T0348547
	T0348548
	T0348549
	T0348550
	T0348551
	T0348552
	T0348553
	T0348554
	T0348555
	T0348556
	T0348557
	T0348558
	T0348559
T0348560	
T0348561	